

Cross

+Viewer

クロスビューワ

内視鏡動画／静止画専用ビューワソフト

データエクスポート

ビューワ機能


画像モード、映像モード、
映像H.264編集モードをタブで選択



VIEWER 機能



動画／静止画表示

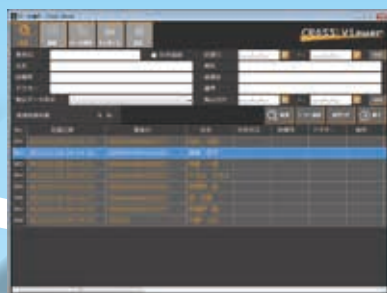

コンテンツ管理／検索



動画編集／静止画キャプチャー

簡単動画編集

編集ソフト不要でH.264の動画編集が可能



データインポート

MPEG4 H.264

JPEG

BMP

TIFF




ポータブルメモリ

内視鏡システムの
動画や静止画を管理し
検索・閲覧・編集ができる
内視鏡画像専用ビューワソフトです

ご利用例① 学会用動画編集ツールとして

[動画編集] H.264 ハイビジョン映像を簡単に編集できます。複数シーンを指定▶▶▶ 結合しエクスポート (外部出力)

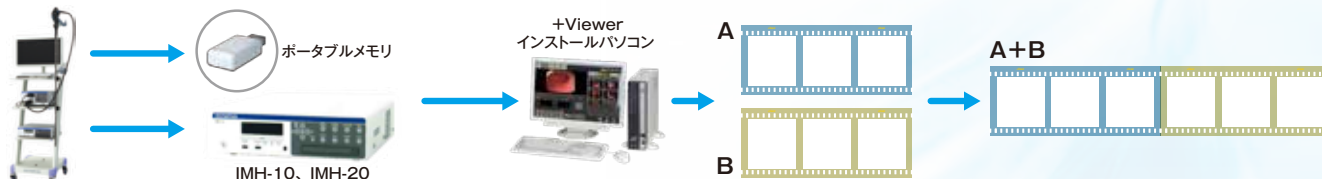

[動画からの静止画切出] 動画再生中に静止画撮影ができます。

ご利用例② 動画/静止画管理ツールとして


OLYMPUS ポータブルメモリ、IMH-10、IMH-20などのデータを取り込み、1台のパソコンで一元管理できます。

- OLYMPUS
- ポータブルメモリ
- IMH-10, IMH-20
- EICP-D
- デジタルカメラ等



ご利用例③ データ二次利用

画像データの二次利用が可能です。右クリック操作で、簡単に静止画をパワーポイントなどにコピー&ペーストすることができます。

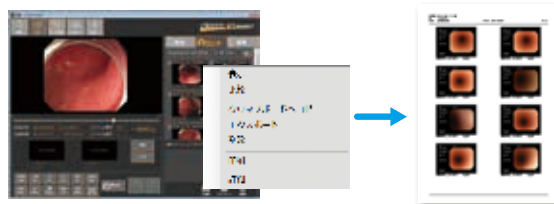

動作環境

	動画運用	静止画運用
対応 OS	Windows7 (32bit,64bit) Windows8 /8.1 (32bit,64bit)	
ディスプレイ	解像度: XGA (1024 × 768) 以上、True Color (32bit) 以上	
動作環境 (CPU)	HD 動画: Intel Core i5 (2.7GHz) 以上 SD 動画: Intel Core i5 (2.4GHz) 以上	Intel Core i3 以上
メモリ	4GB 以上	2GB 以上
HDD 空き容量	300MB 以上	

* Windows8 にて本ソフトの動作を行う場合、「.NET Framework 3.5」の搭載が必須条件となります。
* タッチパネルには対応していません。

● 入出力フォーマット対応表

機 器	入 力		入カメディア	入カフォーマット		出カフォーマット	
	動画	静止画		動 画	静 止 画	動 画	静 止 画
OLYMPUS 社 IMH-10、IMH-20	○	○	外部メディア (USB メモリ、 DVD などの Windows ドライブから インポート可能)	MPEG-4 AVC / H264	JPEG、BMP、TIFF	MPEG-4 AVC / H264	■ IMH 機器で撮影したデータ: JPEG、BMP、TIFF ■ クロスビューワで撮影したデータ: JPEG
OLYMPUS 社 ポータブルメモリ	×	○		対象外	JPEG、TIFF	対象外	JPEG、TIFF
OLYMPUS 社 EICP-D	×	○		対象外	JPEG	対象外	JPEG
デジタルカメラ	×	○		対象外	JPEG、BMP、TIFF	対象外	JPEG、BMP、TIFF

* Microsoft、Windows7、Windows8は、米国Microsoft Corporationの、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
* Intel、Coreは、米国およびその他の国における、Intel Corporationまたはその子会社の登録商標または商標です。
* OLYMPUS社、IMH-10、IMH-20、EICP-Dは、オリンパスメディカルシステムズ株式会社の登録商標です。

**【試用版で動作確認を!】 「エクシオン」でWeb検索、トップページからお試し版
お試し版ダウンロード (10日間利用制限): ダウンロードサイトへ <http://www.exscion.co.jp/product.html>**

⚠ 制限/注意事項

- 1) **ライセンスはPC1台に対し、1ライセンス。**
本ソフトのライセンスは、お客様の所有する1台のコンピュータにインストールし、使用する権利を有しています。2台以上のコンピュータにコピー、インストールし使用することは認められておりません。1ライセンスで、複数PCにインストールするとライセンス違反となり、損害賠償の対象となりますのでご注意ください。
- 2) **推奨PC環境でご利用下さい。**
本ソフトは、推奨スペックのPC環境でご利用下さい。但し、ソフトウェアのインストール状態等固有の環境により、問題が出る場合があります。推奨スペックは本ソフトの動作を保証するものではありません。
- 3) **データは必ずバックアップをお取り下さい。**
本ソフトは動画データや静止画データの閲覧、編集するソフトですので、ハードウェアやデータを保証するものではありません。お客様の責任の下で必ずデータバックアップをお願い致します。
- 4) **ネットワーク経由の動画再生に関して**
ネットワーク経由の動画再生品質は保証致しません。ネットワーク上のストレージ装置から動画再生は可能ですが、ネットワーク環境と映像品質の組合せにより、映像再生時に遅延が生じる場合があります。

開発元



株式会社 エクシオン

【本社】 〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町3-3-6 星和仙台ビル8階
TEL 022-722-5755 FAX 022-722-5266
【東京営業所】 〒101-0041
東京都千代田区神田須田町2-25 山崎須田町ビル6階
TEL 03-6206-9115 FAX 03-6206-9114
【大阪営業所】 〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島5-2-5 中島第二ビル5階506
TEL 06-6195-8001 (FAX共通)

取扱販売店