


# クロスビューワ 簡易操作マニュアル


## ■インポート操作（クロスビューワへIMHデータを取り込む方法）

1、クロスビューワ左上の『インポート』から取り込みたい映像種別を選択します。

（IMHを選択します。）

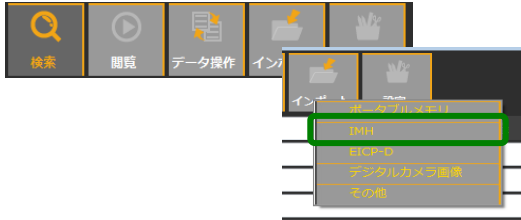


2、インポート画面で、『取込元』の横にある [...] を押し、取り込みたいデータの保存されている場所を指定します。

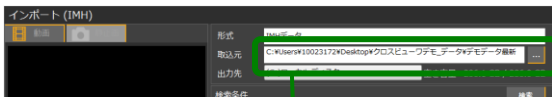


※IMH データの場合、外付け HDD・メモリ等のドライブを選択します。


（日付\_患者 ID フォルダの上の階層を選択します。）

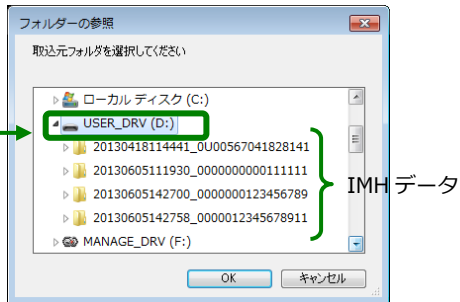

3、『出力先』に、取り込むデータを保存しておきたいPCのドライブを選択します。

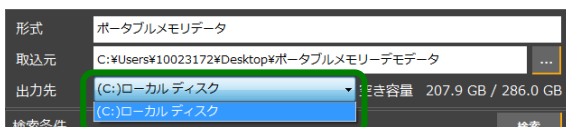

4、取込元、出力先の設定後、『検索』ボタンを押し、取り込みたいデータにチェックを入れ、『インポート』ボタンを押します。

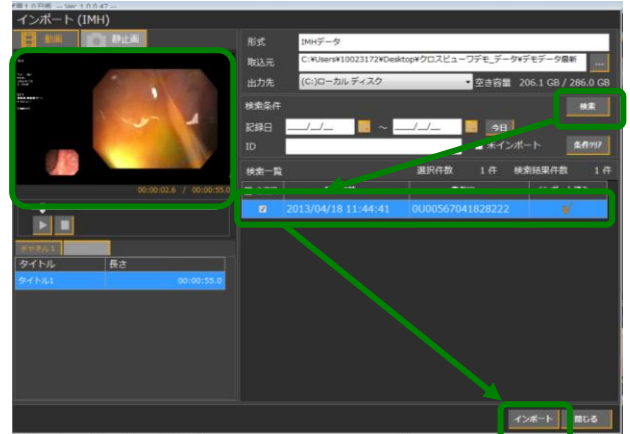

↑取り込みたいデータは、画面左側のプレビュー画面で確認できます。


以上で、インポート操作は、完了です。

（インポートの取込先、出力先は、記憶をしているので、次回も同じ場所であれば、“4”の操作のみで、インポートができます。）

## ■ 検索・閲覧操作

### <検索操作>

- 1、画面右上の検索ボタンを押すと、PC に保存されているデータが検索結果として表示されます。

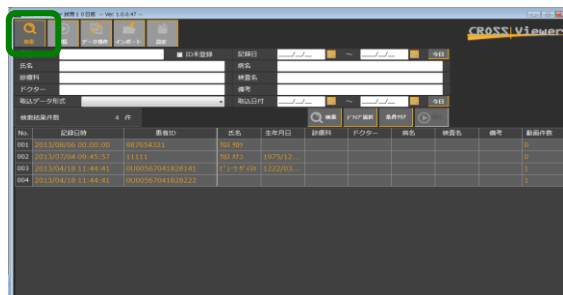


- ※ データの絞り込みを行う場合は、検索条件を入力し、検索ボタンを押します。全件表示させる場合は、検索条件に何も入力しない状態で、検索ボタンを押します。



### <閲覧操作>

- 1、検索結果から、閲覧したいデータを選択し、画面上部の『閲覧』ボタンを押し、閲覧画面に移行します。


- ※閲覧したいデータをダブルクリック、または、検索条件欄の下の『開く』ボタンからも、閲覧画面に同様に移行します。

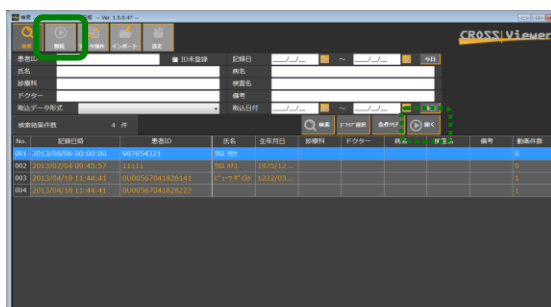


- 2、(動画) 動画タブを選択し、動画データを画面右にドラッグ&ドロップします。画面下部の再生ボタンで再生します。



#### 映像操作ボタンの便利機能

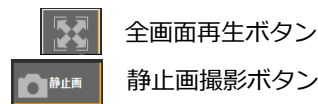

- (編集) 編集タブでは、希望の位置での映像カットが可能です。カットしたい動画のスタート位置で IN ボタンを押し、終了位置で、OUT ボタンを押します。

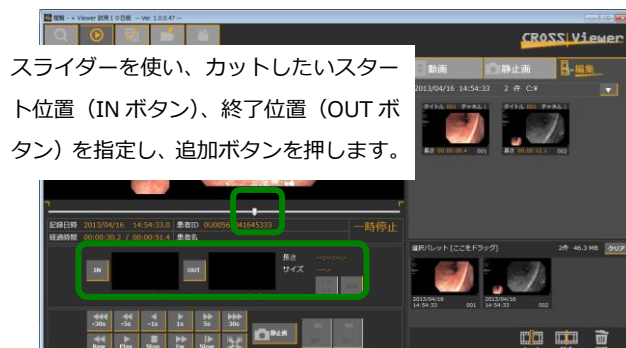

- 編集した動画は、カットした動画ごとファイルのできるシーンカット、1つのファイルとして動画を作成するシーン結合が可能です。

