


クロスビューワ 簡易操作マニュアル


■インポート操作（クロスビューワへポータブルメモリのデータを取り込む方法）

1、クロスビューワ左上の『インポート』から取り込みたい映像種別を選択します。

（ポータブルメモリを選択します。）

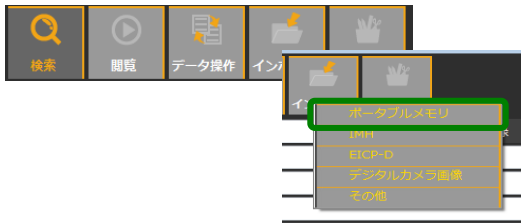


2、インポート画面で、『取込元』の横にある [...] を押し、取り込みたいデータの保存されている場所を指定します。

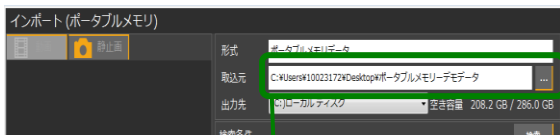


ポータブルメモリの場合、ポータブルメモリのドライブを選択します。


（CV フォルダ、DCIM フォルダの上の階層を選択します。）

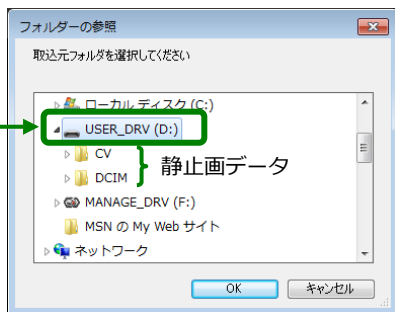

3、『出力先』に、取り込むデータを保存しておきたいPCのドライブを選択します。

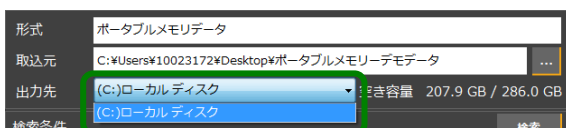

4、取込元、出力先の設定後、『検索』ボタンを押し、取り込みたいデータにチェックを入れ、『インポート』ボタンを押します。

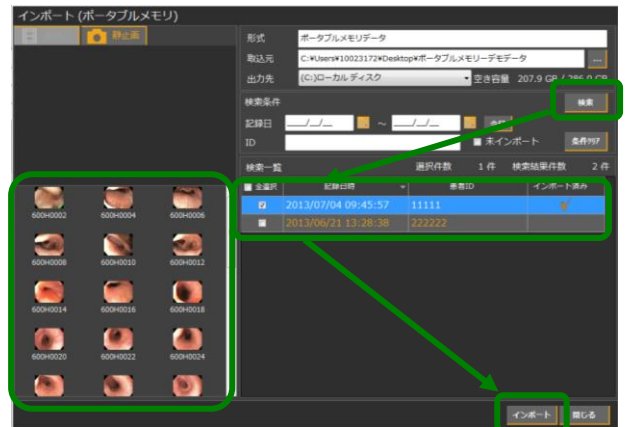

↑取り込みたいデータは、画面左側のプレビュー画面で確認できます。


以上で、インポート操作は、完了です。

（インポートの取込先、出力先は、記憶をしているので、次回も同じ場所であれば、“4”の操作のみで、インポートができます。）

■ 検索・閲覧操作

<検索操作>

- 1、画面右上の検索ボタンを押すと、PC に保存されているデータが検索結果として表示されます。

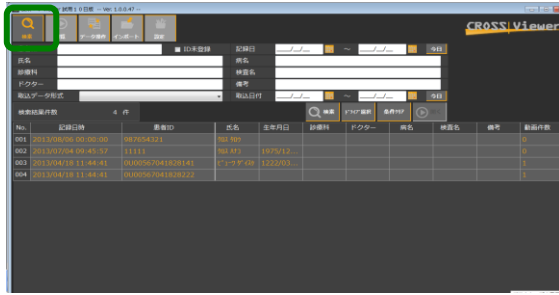


- ※ データの絞り込みを行う場合は、検索条件を入力し、検索ボタンを押します。全件表示させる場合は、検索条件に何も入力しない状態で、検索ボタンを押します。



<閲覧操作>

- 1、検索結果から、閲覧したいデータを選択し、画面上部の『閲覧』ボタンを押し、閲覧画面に移行します。

- ※閲覧したいデータをダブルクリック、または、検索条件欄の下の『開く』ボタンからも、閲覧画面に移行します。

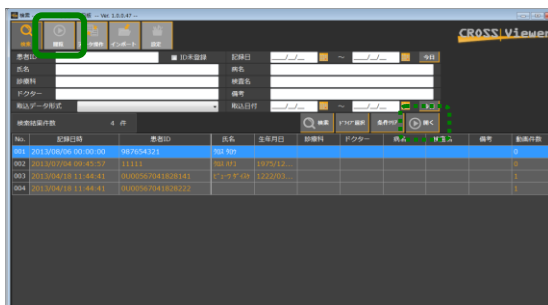

- 2、(静止画) 静止画タブを選択し、静止画を画面右にドラッグ&ドロップします。画面下部の静止画送りボタンで、静止画を閲覧します。



- 選択した画像を印刷、外部媒体に保存することが可能です。



- 『選択パレット[ここをドラッグ]』を『印刷』or『エクスポート』にドラッグ&ドロップ

